


Vis de cicatrisation In-Kone®

Choisir le format de vis de cicatrisation

Idéalement, sur le plan esthétique il est recommandé de placer les vis de cicatrisation en 2 étapes. Une première vis « haute » est placée dans le même temps chirurgical afin de maintenir les tissus œdématisés en place. Puis une dizaine de jours post-chirurgie, une fois les tissus stabilisés, la première vis est maintenue ou remplacée si besoin par un format de vis plus adaptée selon **les trois critères suivants**:

- 1. La hauteur parodontale:** Utiliser la jauge double usage (réf. DJP) en utilisant le côté indiqué ci-contre. Positionnez la jauge sur le col de l'implant et mesurez la partie la plus basse des tissus mous (*généralement le pan vestibulaire*). Choisir la hauteur de la vis de cicatrisation correspondant, en privilégiant toujours le format de vis inférieure à la mesure (par exemple choisir une vis de hauteur 1.5 mm pour une mesure prise à 2.0 mm)
- 2. Le diamètre de la vis de cicatrisation :** Choisir le diamètre selon le profil de la dent à restaurer. Se référer au tableau de correspondances ci-dessous (donné à titre indicatif). Les données s'appliquent à des édentements unitaires; en cas de restaurations plurales ces données peuvent être modulées.

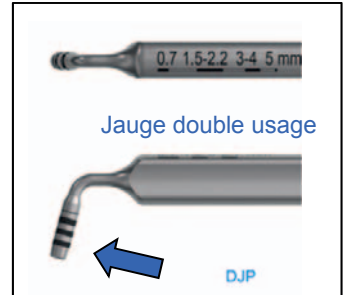


Recommandation indicative des profils d'émergence

Le système propose 3 diamètres de profils d'émergence : 4.0, 5.0 et 6.5 mm. Le schéma ci-dessous donne à titre indicatif les diamètres recommandés par dent.


	Droite								Gauche								
Diamètre	5	6.5	6.5	5	5	5	4	6.5	6.5	4	5	5	5	6.5	6.5	5	Diamètre
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
	8	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7	8	
Diamètre	5	6.5	6.5	4/5	4/5	4	4	4	4	4	4	4/5	4/5	6.5	6.5	5	Diamètre

- 3. La version de vis:** Le système In-Kone® propose deux versions de vis avec tête supra-sulculaire plate et haute. Ces deux versions permettent d'adapter la vis à la situation clinique.

- La version haute sera favorisée en cas de :
 - Profil gingival asymétrique (p. ex. cas du secteur antérieur, d'extractions récentes, de greffes conjonctives...)
 - Lors d'une chirurgie en 1 temps du fait de l'œdème des tissus mous
- La version basse sera favorisée en cas de:
 - Profil gingival symétrique (p.ex secteur postérieur, extractions anciennes...)
 - Port d'un provisoire (bridge collé ou PAP).

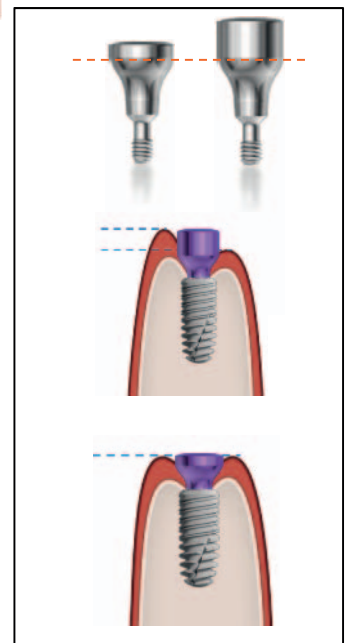

Visser manuellement les vis à l'aide des tournevis hexagonaux (Réf. DCM1,2) ou bien des tournevis extracteurs (Réf. DEMC1,2)

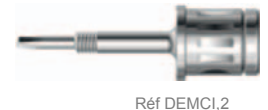

Vis de cicatrisation : implants In-Kone®

Tableau de références

Hauteur parodontale	Hauteur	Ø 4.0	Ø 5.0	Ø 6.5
0.7 mm	plate	DVCICI4H0.7	DVCICI5H0.7	
0.7 mm	haute	DVCIHCI4H0.7	DVCIHCI5H0.7	
1.5 mm	plate	DVCICI4H1.5	DVCICI5H1.5	DVCICI6.5H1.5
1.5 mm	haute	DVCIHCI4H1.5	DVCIHCI5H1.5	DVCIHCI6.5H1.5
2.2 mm	plate	DVCICI4H2.2	DVCICI5H2.2	DVCICI6.5H2.2
2.2 mm	haute	DVCIHCI4H2.2	DVCIHCI5H2.2	DVCIHCI6.5H2.2
3 mm	plate	DVCICI4H3	DVCICI5H3	DVCICI6.5H3
3 mm	haute	DVCIHCI4H3	DVCIHCI5H3	DVCIHCI6.5H3
4 mm	plate	DVCICI4H4	DVCICI5H4	DVCICI6.5H4
4 mm	haute	DVCIHCI4H4	DVCIHCI5H4	DVCIHCI6.5H4
5 mm	plate	DVCICI4H5	DVCICI5H5	DVCICI6.5H5
5 mm	haute	DVCIHCI4H5	DVCIHCI5H5	DVCIHCI6.5H5
7 mm	plate	DVCICI4H7	DVCICI5H7	
7 mm	haute	DVCIHCI4H7	DVCIHCI5H7	

La fin de chaque référence indique le diamètre et la hauteur du profil (p. ex DVCICI4H1.5 = Ø 4 mm x ht. 1.5 mm). Ce même principe est repris sur les références des composants prothétiques définitifs. Pour une utilisation optimale du système assurez-vous que le profil du composant correspond à celui signé par la vis de cicatrisation.

Observation. Toutes les formats de vis ne sont pas systématiquement déclinés pour tous les composants. Pour une utilisation précise, il est vivement recommandé de contrôler les formats des composants prothétiques envisagés en amont afin de sélectionner la vis de cicatrisation adaptée.



Lecture en bouche: Les vis sont munis d'un code couleur par hauteur parodontale ainsi que d'un marquage laser indiquant le diamètre et la hauteur.

Recommandations :

- Les vis de cicatrisation ne sont pas livrées stériles, pensez à les décontaminer et les **stériliser** avant votre intervention selon les recommandations de la notice d'instructions. Les vis de cicatrisation sont à usage unique.
- Il est primordial de transmettre votre choix de hauteur et de diamètre de vis de cicatrisation à votre **prothésiste**.
- La vis de cicatrisation signe la forme d'un manchon gingival. Il est impératif que le faux-moignon s'y inscrive parfaitement, ce qui signifie que la hauteur du faux-moignon doit correspondre **taille pour taille** à la vis choisie.